



3 ans de garantie

Sellerie non garantie

Made in France



**Poids Max supporté :
130 kg**



Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

3760346100365

FAUTEUIL QUADRISCHIOS LUXE

Réf. FF1-209

DESCRIPTION

FAUTEUIL QUADRISCHIOS LUXE réf FF1-209

Le **Fauteuil de Rééducation des Ischios jambiers et Quadriceps** a été conçu pour la rééducation des genoux et des muscles ischios jambiers/quadriceps.

Il permet le travail des Quadriceps et des Ischios en position assise ou couchée.

Le **dossier du fauteuil** est réglable et relevable (*inclinaison de 0° à 90°*), assisté par un vérin à gaz qui se débloquent par action du pied sur une pédale.

Un **appui tête réglable** en hauteur et profondeur permet d'assurer un confort du patient. (*serrage par bouton M10*)

Un **coulisseau support de cuisse** permet un réglage des 2 assises au niveau de la cuisse/articulation des genoux. (*coulisseau blocable par 2 boutons M8 de serrage situés sous l'assise*)

Il est possible de sangler le patient au niveau des cuisses pour un meilleur maintien au fauteuil. (*utilisation des sangles de maintien des membres inférieurs*)

En position couchée sur le ventre : le patient peut se mettre sur le ventre et se maintenir au dossier de la table par **2 poignées de maintien** situées derrière le dossier.

Le BALANCIER du Fauteuil :

Doté d'un balancier et de disques de charge, le système de balancier offre une plage de réglages angulaires et des bras de levier, permettant une grande amplitude dans le choix des forces à fournir par le patient.

Le **Balancier du Fauteuil** peut être utilisé **à gauche** ou **à droite** selon le besoin de rééducation recherché par le praticien.

Les **charges** sont fixées sur un **support "porte charge"** qui coulisse sur le **bras externe** du balancier.

Un **ressort "bloc charge"** permet de les bloquer sur le **support de charge**.

Les charges peuvent être stockées à la base du fauteuil lorsque celui-ci n'est pas utilisé. (*jusqu'à 13,5 kg de charge*)

Grâce à une **couronne de réglage** et un **"pion pilote"**, on permet la synchronisation de l'action du bras de levier **appui tibia** (*bras intérieur*) avec le **support de charges** (*bras extérieur*).

Deux butées placées sur la couronne permettent de régler et bloquer l'amplitude angulaire de l'exercice. (*on positionne les butées dans les trous de la couronne et on les bloque avec des Goupilles Béta*)

Un **Appui Tibia Simple** (**1 boudin noir**) réglable coulisse sur le bras intérieur du balancier (*peut être équipé en option d'un Double appui Tibial réf FF1-2060 (avec 2 boudins noirs) ou d'une Gouttière Support Tibia rotatif réf FF1-211*).

Une **manette de maintien** permet au patient de s'aider à actionner le Balancier et doser l'effort à l'exercice.

Livré avec 13,5 kg de charge

(2 poids de 5 kg, 1 poids de 2 kg, 1 poids de 1kg, 1 poids de 0,5 kg)

Possibilité d'ajout en option sur le Balancier :

- un double appui tibial ref FF1-2060
- un appui tibial rotatif ref FF1-211
- un deuxième Balancier complet (sans les charges) réf FF1-210

ATTENTION : le Fauteuil et son Balancier forment un dispositif de rééducation des genoux et des muscles ischios jambiers/quadriceps, et ne sont pas à être utilisé comme un Appareil de Musculation ou de Fitness.

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Encombrement au sol :

1,20 m x 0,65 m

Hauteur de l'assise par rapport au sol : 0,77 m

Largeur de l'assise : 63 cm

Hauteur du fauteuil en position assise : 1,50 m (dossier relevé)

Hauteur du fauteuil en position couché : 0,77 m (dossier couché)

Réglage appui tête : 19 cm en hauteur / 10 cm en profondeur

Réglage appui cuisse : 10 cm maxi

Poids : **70 kg**

Poids supporté : 130 kg

4 vérins stabilisateurs du sol.

Dossier réglable de 0° à 90° (*position assise/ couchée*) par vérin à gaz situé derrière le dossier.

Le déblocage du dossier s'effectue en appuyant sur la pédale située sur le piétement du fauteuil.

Matelassure : **Mousse galbée recouverte en expansé**

Sellerie au choix : **Piqûres façon Sellier**

Coloris : **au choix**

Appui-tête réglable en hauteur et profondeur.

Assise en 2 parties avec sangles de fixation.

1 coulisseau Cales cuisse réglable en longueur.

Balancier pendulaire doté d'une couronne de réglage d'inclinaison, blocage par "butée pilotée".

Poignée de maintien de la charge pour le travail statique intermittent.

Châssis mécano soudé en tube acier rectangulaire à forte section

Finition : peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C.

Fauteuil livré avec :

- 1 balancier (à positionner à gauche ou à droite)
- 13,5 kg de charge
- 2 sangles de fixation maintien des cuisses

Chassis de série : peinture époxy blanche

SELLERIE

Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



MOUSSE

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)

Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)

OPTIONS PROPOSÉES

FF1-210 2 EME BALANCIER ADAPTABLE (sans charges)

FF1-2050 - 13,5 kg de charge

FF1-2060 Double Appui Tibial

FF1-211 Gouttière simple appui Tibial

PHOTOS COMPLÉMENTAIRES

