


**3 ans de garantie**
**Sellerie non garantie**
**Made in France**

**Poids Max supporté :  
140 kg**


Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

**3760346100761**

## TABLE DE VERTICALISATION "TOP NIVEAU"

 Réf. **TF1-2860**

### DESCRIPTION

La **Table de Verticalisation "Top Niveau" réf TF1-2860** a pour fonction la verticalisation d'un patient afin de favoriser la réossification et le renforcement musculaire des membres inférieurs, la stimulation et réactivation de la circulation sanguine.

La **Table de verticalisation "TOP NIVEAU" réf TF1-2860** permet de redonner une certaine autonomie au patient, de retrouver progressivement la station debout, d'effectuer des tâches en position debout ou inclinée, et de retrouver des sensations en douceur pour la position verticale.

L'utilisation d'une **Tablette de travail réf TF1-2780 C (en option)** permet de diversifier les activités et apprentissages manuels.

*Par exemple : la Table permet de maintenir à la verticale ou incliné un patient "appareillé" ou non, qu'il soit à domicile ou dans une structure médicalisée. La Tablette de travail viendra en complément pour aider le patient à s'exercer à manipuler des objets, ou à l'aide à l'autonomie.*

Équipée de 4 roulettes autobloquantes, la table peut être facilement déplacée et sécurisée (**déplacement possible uniquement avec le patient sanglé sur la table**).

En position horizontale, elle permet de transférer ou de poser un patient en position allongée.

On sangle le patient au niveau du tronc et des membres inférieurs. (sangles de maintien sur la zone des cuisses et une pour le maintien du tibia)

*Puis, on peut incliner la table vers la position verticale, évitant ainsi de manipuler le patient avec des orthèses.*

**Les critères essentiels** de cette Table de Verticalisation :

la **sécurité**, la **stabilité** du dispositif, l'**accessibilité** pour le patient lorsqu'il est verticalisé (**tablette amovible ou accès aux meubles standards**) , et la **maniabilité** de la table.

Description

- 1 Dossier (0,75 m x 0,70 m) réglable de 0° à 90° par vérin à gaz situé sous le dossier, **débloqué par une manette de déblocage**.
- 1 Plateau constitué de 2 plans jambières fixes (long 1,20 m).
- 2 Poignées de maintien (*situées latéralement de la table, réglables pour le confort de l'appui du patient*)

- 2 sangles de maintien des membres inférieurs (*cuisses et tibias*)
- 2 Palettes réglables situées en bout du châssis (*réglables pour s'adapter à la taille du patient*).

La table a une plage de réglage de la hauteur de 44 cm grâce à un vérin électrique à vitesse rapide. (14mm/s)

Le plan verticalisateur peut s'incliner de 0° à + 90° grâce à un vérin électrique à vitesse semi lente (7 mm/s) (*pour le confort et sécurité du patient*)

Le pilotage de la montée/descente et de l'inclinaison du plan verticalisateur s'effectue avec une télécommande pneumatique manuelle..

Un **compas indicateur** d'inclinaison (aiguille compas) permet de renseigner le degré d'inclinaison du plateau.

Le Pilotage de la Table s'effectue par une **Télécommande pneumatique (2 vérins)** permet d'actionner la montée/descente de la table et l'inclinaison du plan verticalisateur.

**Note importante aux (futurs) utilisateurs :**

**(\*) ne jamais verticaliser un patient quand la Table est en position basse minimum (risque de collision avec le sol)**

**1/ Toujours s'assurer que les roulettes de la table sont bloquées lors de son utilisation (roulettes bloquées avec frein engagé)**

**2/ Toujours lever le plan verticalisateur avant de procéder à l'inclinaison du plan .**

**(→ lever de +5 cm minimum pour faciliter l'inclinaison du plan sans risque de collision avec le sol)**

**3/ une fois le plan levé de + 5 cm, vous pouvez commencer à incliner le plan verticalisateur.**

**Toujours veiller à ce que le plan ou les palettes ne viennent pas en contact avec le sol lors du pilotage des positions.**

*(en cas d'inclinaison "forcée" du plan en position hauteur basse, les palettes risquent de venir en contact avec le sol et de soulever accidentellement le châssis)*

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Caractéristiques Techniques :

Hauteur min. : **0,54 m**

Hauteur max. : **0,90 m**

Longueur : **1,90 m**

Largeur : **0,70 m**

Poids : **105 kg**

Inclinaison du châssis supérieur : **0° à +90°**

**Poids supporté : 140 kg**

### Rigidité MAXIMUM du châssis

- 1 Dossier relevable par vérin à gaz débloable par manette (0° à +90°)
- Montée/descente par vérin électrique vitesse "rapide"
- Inclinaison du plan verticalisateur à vitesse "semi lente"
- peut supporter un patient **jusqu'à 140 kg de charge**
- Pilotage de la montée/descente et de l'inclinaison par télécommande pneumatique HANNING

### Table livrée complète avec :

- 2 palettes standards repose pieds pour le patient réglables et indépendantes (larg. 23 cm x prof. 40 cm (chacune)) (*Palettes bois recouvertes d'un revêtement anti-dérapant*)
- pour info : *possibilité d'adapter l'option **Palette anti équin réf TF1-2780 D** en lieu et place des palettes standards*
- 2 barres de fixation pour les sangles.

- 1 rail central pour faciliter le sanglage. (*curseur + anneau de sanglage sur lequel se reprend des sangles*)
- 2 poignées de maintien réglables en hauteur et en profondeur, amovibles pour faciliter les transferts (*supports pouvant translater sur le bord latéral du châssis*)
- 1 indicateur d'inclinaison (0° à +180°)
- **2 sangles de fixation des membres inférieurs réf SF1-22 (à retrouver dans la section SANGLES)**
- 1 sangle de maintien abdominale
- 4 roulettes autobloquantes avec frein, à double rangée (2 roues par roulettes pour le support des charges lourdes)

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

### Vérin électrique de montée/descente

**Force : 10 000 N – 230 V – 50 Hz**

**Vitesse ultra rapide : 22 mm/s**

Consommation : 1,5 A – 350 W

Commandé par boîtier manuel à pression d'air.

### Vérin électrique de verticalisation

**Force : 7000 N – 230 V – 50 Hz**

**Vitesse rapide : 7 mm/s**

Consommation : 1,5 A – 350 W

Commandé par boîtier manuel à pression d'air.

Pilotage des vérins par Télécommande pneumatique "2 vérins"

Châssis de série : *peinture époxy blanche*

## SELLERIE

### Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



### Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



## MOUSSE

Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m<sup>3</sup>



## COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)



## OPTIONS PROPOSÉES

TF1-2780 B Double commande Hanning

TF1-2780 C Tablette de travail (61x42 cm)

TF1-2780 D Palettes anti-équin

TF1-2780 G Jeu de sangles de maintien supplémentaire

TF1-4110 Trou de visage

Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)