

MANUEL D'UTILISATION



TABLE MONDIALE T.P.E. Réf TF1-2880 TPE

FRANCO & Fils

CONSTRUCTEUR

760 AVENUE DE PARIS

58320 POUQUES LES EAUX

Tél: 03-86-68-83-22

Fax: 03-86-68-55-95

www.francofils.com - infos@francofils.com



Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100792

Préfixe GTIN : 376034610

BASIC UDI-DI : 37603461TF1-288042

SIEGE SOCIAL :

Z.I. NATIONAL 7

58320 POUQUES-LES-EAUX

Tél. 03 86 68 83 22

Fax : 03.72.27.97.26

Site : www.francofils.com

E-mail : info@francofils.com

N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 66691880454 - NAF 3250 A

DECLARATION CE DE CONFORMITE CONFORMEMENT

Aux Annexes I et VII DU DECRET N° 95-282 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Annexes I et VII de la Directive 93/42 CEE)

ANNEXE I : par l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'Article R. 5211-24 du code de la santé publique.

ANNEXE VII : par l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs médicaux, pris en application de l'Article R. 5211-7 du code de la santé publique,

Par l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les modalités d'application des procédures de certification de la conformité définies aux articles R. 5211-39 à R. 5211-52, pris en application de l'article R. 5211-53 du code de la santé publique.



Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100792

Préfixe GTIN : 376034610

BASIC UDI-DI : 37603461TF1-288042

TABLE MONDIALE Réf TF1-2880 TPE

Je soussigné, Monsieur FRANCO Pierre, P.D.G. de la société FRANCO & Fils, Zone Industrielle - RN7 - 58320 POUQUES LES EAUX, assure et déclare que les dispositifs médicaux dont la liste est annexée appartiennent à la classe 1 et satisfont aux dispositions du décret qui leur sont applicables.

De ce fait je m'estime remplir les obligations des exigences essentielles selon les annexes II et VII de la directive 93/42 CEE.

à Pouques Les Eaux, le 07/02/2024

Mr FRANCO Pierre
P.D.G.



Certificat de Conformité U.E. défini à l'annexe XII du règlement (UE) 2017/745.

Règlement (UE) 2020/561 [2017/745](#) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1-175)



Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100792

Préfixe GTIN : 376034610

BASIC UDI-DI : 37603461TF1-288042

TABLE MONDIALE Réf TF1-2880 TPE

Je soussigné, Monsieur FRANCO Marc Olivier , P.D.G. de la société FRANCO & Fils, Zone Industrielle - RN7 - 58320 POUQUES LES EAUX, assure et déclare que les dispositifs médicaux dont la liste est annexée appartiennent à la classe 1 et satisfont aux dispositions du règlement qui leur sont applicables.

De ce fait je m'estime remplir les obligations des exigences essentielles du règlement (UE) 2017/745

à Pouques Les Eaux, le 06/02/2024



Mr Marc Olivier FRANCO

FICHE DESCRIPTIVE

Il est possible suivant le choix du client de rajouter certaines options spécifiques.

FONCTION: Table - Divan d'examen à Hauteur Variable équipé de 3 vérins électriques

NOM COMMERCIAL: FRANCO & Fils

UTILISATION: permet d'installer un patient en position basse et de l'amener à la hauteur désirée par le praticien pour un examen, et de positionner les plans de la table en position cyphose afin de faciliter le travail du praticien.

DESTINATION: Kinésithérapeutes - Centres de Rééducation
Hôpitaux - Médecins

Critères utilisés pour les règles de classification:
- définies par l'annexe IX du Livre V bis.

Durée : utilisation temporaire
Normalement destinée à être utilisée en continu pendant moins de 60 minutes

CLASSIFICATION: CLASSE 1
Règle 1 (Règle de classification de l'Annexe II) : Dispositif non invasif

CLASSE GNDM : 39849 [Table physical therapy multifunction](#)

Date de dernière mise à jour documentaire et technique : 06/02/2024

NOS EXIGENCES DE FABRICATION :

Chaque dispositif médical fabriqué par nos soins est conçu et fabriqué de manière à ne pas compromettre la sécurité des patients et la santé des utilisateurs, ou de toute autre personne étrangère à l'utilisation proche de ce dispositif médical.

Cette table est classée dans la nomenclature internationale des Dispositifs Médicaux.

Conjuguant notre savoir faire au soin apporté au choix des matériaux constituant cette table, ainsi qu'à la qualité de fabrication et de finition, cette table répondra aux besoins des praticiens exigeants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

TF1-2880 TPE Tête standard + accoudoirs réglables *mousse souple 5 cm*

Hauteur mini: 0,47 m - Hauteur maxi: 0,88 m

Longueur: 1,95 m - Largeur : 0,60 m


Poids: 110 kg – **Poids supporté : 160 kg**

1 dossier réglable de: 0° à 85° en position assise / 0° à + 10° en position cyphose

1 assise réglable: 0° à + 18° en position cyphose.

1 tête réglable de – 30° à + 40° et ses accoudoirs.

Accoudoirs situés sur la tête réglables en hauteur et suivant la position cyphose.

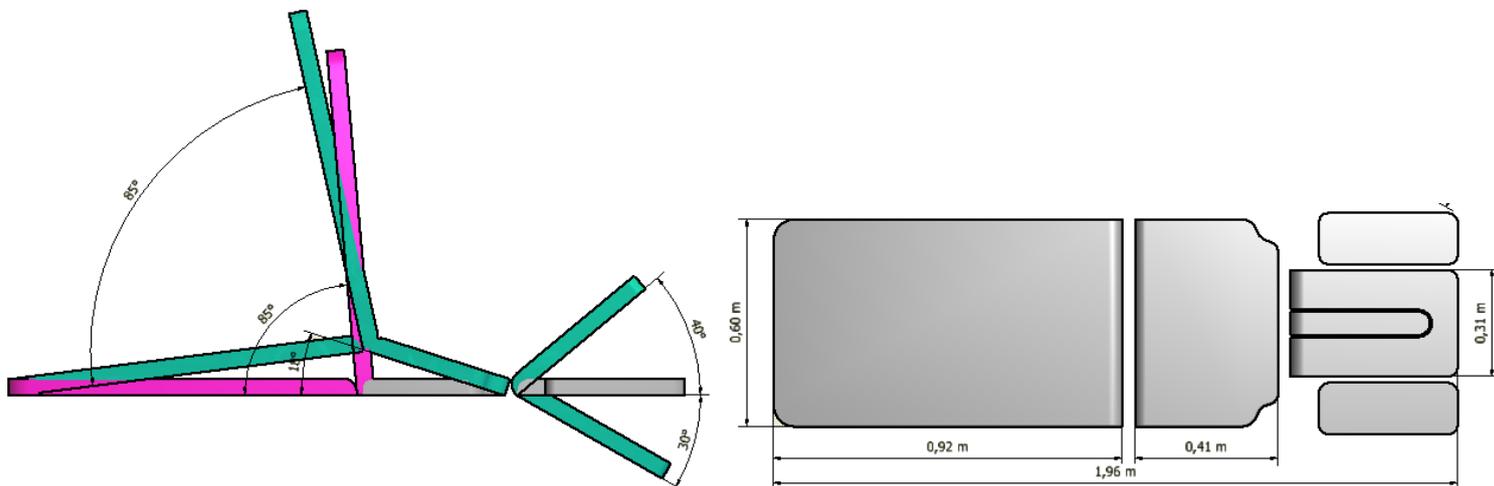

MOTORISATION : par 3 moteurs électriques HANNING

Cyphose électrique commandé par télécommande

Dossier / jambier commandé par télécommande

Montée/Descente commandé par le cadre de commande

VERIN A GAZ pour inclinaison tête :

Vérin à gaz Bansbach, à déblocage, série K0A1K73-120-382-002-250 N

Déblocage par manette située à l'avant de la tête.

CHASSIS:

Châssis grenailé et recouvert de poudre polyester époxy blanche cuite au four à 200°C.

MOTORISATIONS ELECTRIQUES

Vérin électrique de montée / descente : HANNING type **SL95**

Force : 6000 N - Vitesse : 22 mm/s - Course de vérin : 200 mm


Consommation : 2,4 A Durée d'utilisation maximale : 4 mn en continu

Résistance à la corrosion IP55

Protection thermique : condensateur 12UF Fusible : T1,6/250

NORME VDE 0750 = CEI (Commission Electrique Internationale)

CEI 601.1 CE de conformité selon directive CE73/23/CEE

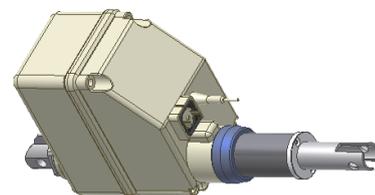

Vérin de Dossier / jambier : Vérin Hanning **SL80**

Force : 6000 N - Vitesse : 22 mm/s - Course de vérin : 200 mm

Consommation : 2,4 A Durée d'utilisation maximale : 4 mn en continu

Résistance à la corrosion IP55

Protection thermique : condensateur 12UF Fusible : T1,6/250

NORME VDE 0750 = CEI (Commission Electrique Internationale)

CEI 601.1 CE de conformité selon directive CE73/23/CEE



Vérin de Cyphose HANNING type SL56

Force : 4000 N - Vitesse : 7 mm/s - Course de vérin : 100 mm

Consommation : 2,4 A Durée d'utilisation maximale : 4 mn en continu

Résistance à la corrosion IP55

Protection thermique : condensateur 12UF Fusible : T1,6/250

NORME VDE 0750 = CEI (Commission Electrique Internationale)

CEI 601.1 CE de conformité selon directive CE73/23/CEE



CHASSIS

Châssis grenailé et recouvert de poudre polyester époxy blanche cuite au four à 200°C.

SELLERIE :

Matelassure aux choix :

- Mousse Souple 5 cm - 40 kg/m³
- Mousse dense 4 cm - 70 kg/m³

Sellerie aux choix :

- P.S. : Piqûres façon Sellier
- T : Tendue sans couture

HABILLAGE

Des goûts et des couleurs : CUIR SUR DEMANDE

GAMME
Classement M2

Traité permablok
contre les bactéries



MELONE



DELFT



TURKIS



TITAN



ROT



BÛCHE



SCHWARTZ

INDICATIONS GÉNÉRALES

Le châssis et le cadre de la table sont conçus pour supporter des charges importantes. La charge maximum admissible par la table est de 180 kg.

Si par mégarde vous utilisez l'un des vérins électriques plus de 4 minutes en continu, ce dernier se coupera de lui-même, garantissant une sécurité en cas de surcharge. Il est indispensable de débrancher le boîtier de commande en cas de surcharge

La Table n'est pas antistatique.

FONCTIONNEMENT

I/ Mise en fonctionnement:

Avant toute utilisation de la table, vérifier l'état général de la table et de ses composants :

- s'assurer que votre installation électrique est conforme au réseau EDF (230V/50 Hz) et que votre prise de courant est bien reliée à la terre.
- vérifier que les câbles électriques ainsi que les fils de la télécommande ne risquent pas de se coincer et de se sectionner lors du fonctionnement de la table.
- vérifier que les roulettes ou le pied de la table ne coincent pas les fils électriques
- brancher le fil d'alimentation électrique sur votre prise de courant.



CONSIGNES DE SECURITÉ RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES :

• Lorsque vous travaillez avec votre patient sur un tabouret, ou sur une chaise, veillez à ne pas laisser vos genoux sous le châssis supérieur de la table lorsque vous actionnez le cadre de commande : vous risqueriez de vous coincer les genoux lors de la descente de celle-ci.



- **Se mettre à l'écart de la table lors de la montée/Descente**
- Les tuyau des commandes doivent être écartés de tout risque de sectionnement ou de coincement par la table ou tout élément extérieur au fonctionnement de la table.
- Les tuyaux ne doivent pas vous gêner dans votre travail : placer-les de manière à ne pas vous prendre les pieds dans les tuyaux et les fils.
- Ne jamais laisser tout le poids du corps peser entièrement sur la commande aux pieds.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système de déblocage et du vérin.
- Ne pas mettre la table à proximité d'un mur, d'un meuble : la table doit se trouver dans une zone d'espace libre d'obstacles.
- Ne pas s'asseoir sur la Tête ou sur les accoudoirs.
- Ne jamais se mettre debout sur la table.
- Ne jamais se pencher sous la table lors du fonctionnement de la table
- Ne jamais se pencher vers la table lors de sa descente ou sa montée.
- Ne jamais mettre les mains, bras, pieds, jambes dans une zone mouvante de la table car
- Vous risqueriez de vous coincer, de vous blesser.
- En cas de dysfonctionnement de la table, ne jamais intervenir sur celle-ci sans avoir vérifié que celle-ci était arrêtée et débranchée.
- Toujours se mettre à l'écart de la table pour piloter sa montée/descente.
- Avant chaque nettoyage de la table, s'assurer que le câble électrique est débranché.
- Vérifier toujours que le patient ne risque rien sur la table (il doit toujours se trouver dans une position de sécurité, allongée ou assise)
- Vérifier avant toute utilisation le poids de votre patient afin de ne pas dépasser la charge admissible maximum de 160 kg
- Respecter la tension électrique d'utilisation (230 V CA / 50 Hz)
- Lors de l'installation du patient sur la table, prenez soin de vérifier qu'aucun objet, vêtement, membres inférieurs ou supérieurs ne puissent être entraînés par les organes en mouvement (mains, pieds, jambes,..)
- Ne jamais laisser la table sans surveillance de l'opérateur lors de son fonctionnement, hors cas de force majeure.
- Ne jamais accéder sous la table sans l'avoir débranchée.
- Avant chaque nettoyage de la table, s'assurer que le câble électrique est débranché.
- Ne jamais laisser seule toute personne étrangère au fonctionnement de cette table.


- Ne jamais laisser les commandes aux patients, excepté cas de force majeure.
- Ne jamais de pencher, se mettre sous la table avant l'arrêt de celle-ci avant même d'avoir débranché le fil d'alimentation électrique.
- Ne jamais laisser un objet ou un membre dans les zones de mouvements mécaniques de la table (**zones dangereuses** énoncées plus loin dans la notice)
- Le fil de la commande pneumatique doit être écarté de tout risque de sectionnement ou de coincement par la table ou tout élément extérieur au fonctionnement de la table.
- Toujours raccroché la commande sur le châssis en fin d'utilisation de la Table.
(* un petit passant situé latéralement du châssis sert à accrocher la commande)
- Vérifier qu'aucun objet, mobilier, vêtement, membre ne vienne gêner le déblocage/blocage de la tête : se décaler de la Tête lors du réglage de l'inclinaison de la tête.
- Lors de tout déplacement de la table, suivre les consignes de transports, et veillez à ne pas cogner la table.
- Toujours vérifier que la table est sur patins après déplacement pour éviter tout risque de déplacement inopportun de la table.

IMPORTANT :

Ne Jamais Déplacer la Table sans s'être assuré que les fils électriques aient été préalablement débranchés.

RISQUES DE BASCULEMENT :

Il est vivement déconseillé de s'asseoir sur les extrémités de la table afin d'éviter tout risque de basculement (au-delà de 100 kg en bout de table)

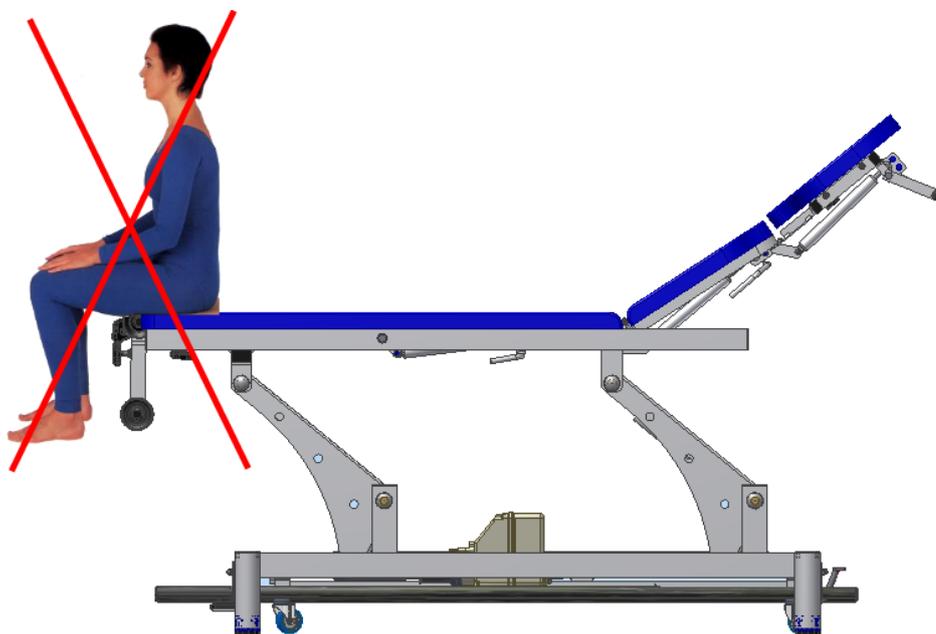

CHARGES :

Le dossier ne doit être utilisé que pour l'appui du patient, et ne doit pas faire office d'assise, excepté lorsque celui-ci est en position horizontale.


2/ RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA TABLE :

Veillez à ce que votre patient soit installé le plus confortablement possible et que toutes les précautions d'usage ont été respectées.

o cadre de commande:

Appuyer sur la barre avec le pied pour **commander la Montée**

Relever la barre avec le pied pour **commander la Descente**.

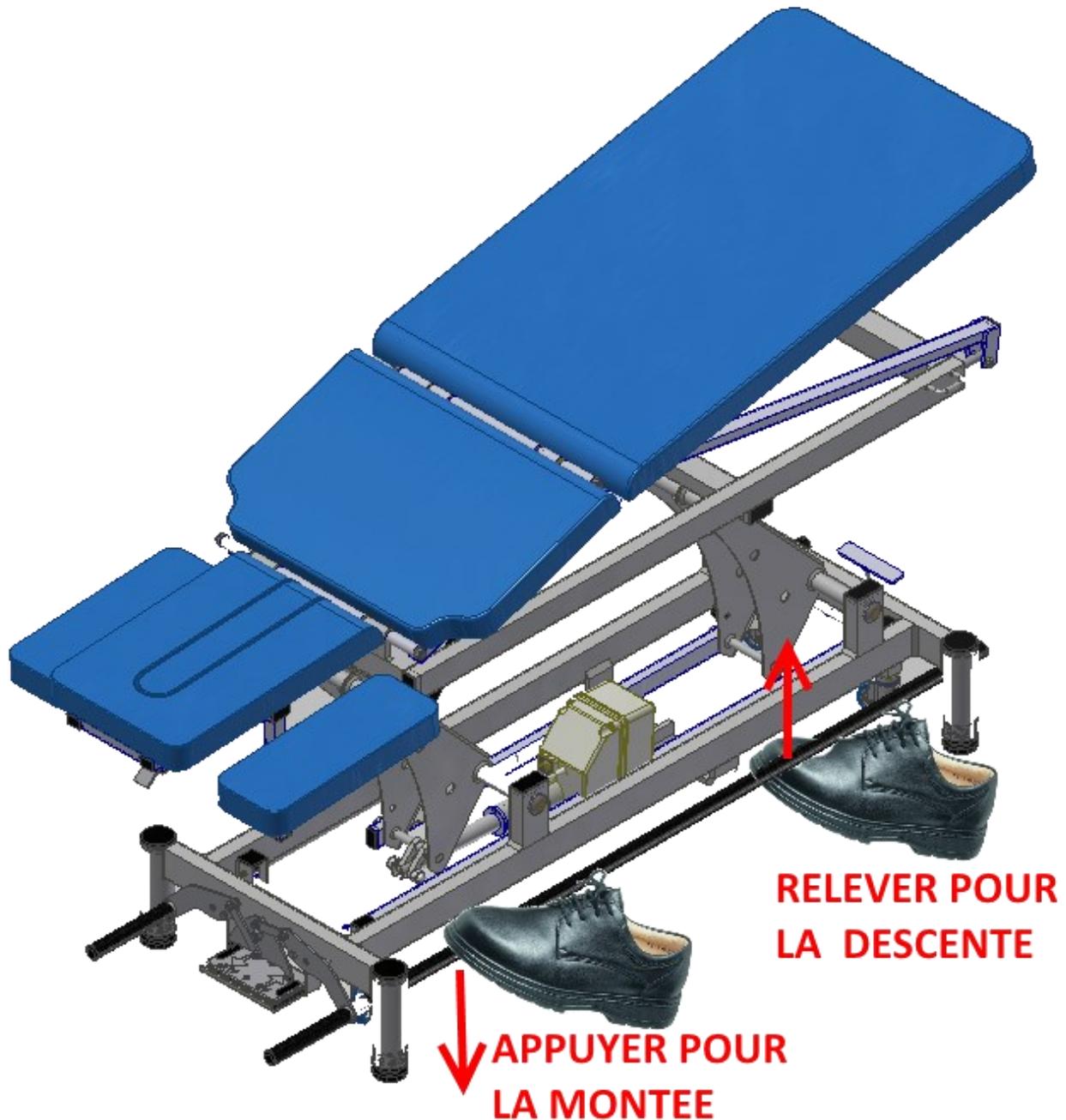

3° / RÉGLAGE DU DOSSIER :

Avant tout réglage du dossier, merci de vérifier les points suivants :

- Veillez à ce que votre patient soit installé en sécurité sur la table, en position assise pour faciliter le réglage du dossier et éviter tout désagrément de confort du patient.
- Veillez à ce qu'aucun vêtement, membres du patient (bras, jambes, mains, doigts) ne soit dans la zone de mouvement de la table.
- Le réglage peut s'effectuer avec le patient installé en position assise ou couché avec le dos appuyé sur le dossier relevable.
- Ecartez-vous de la table et des zones de mouvement pour utiliser la table et procéder au réglage.

Pour régler le dossier, il vous faudra prendre en main la Commande et appuyer sur le bouton Commandant l'inclinaison du dossier

1/ prenez la télécommande en main



2/ appuyer sur le bouton de montée/descente actionnant l'inclinaison du dossier

3/ relâcher le bouton de la commande, le dossier est bloqué en position

Le patient peut s'appuyer contre le dossier.

4/ raccrocher la télécommande sur son support

**Commande
du dossier**

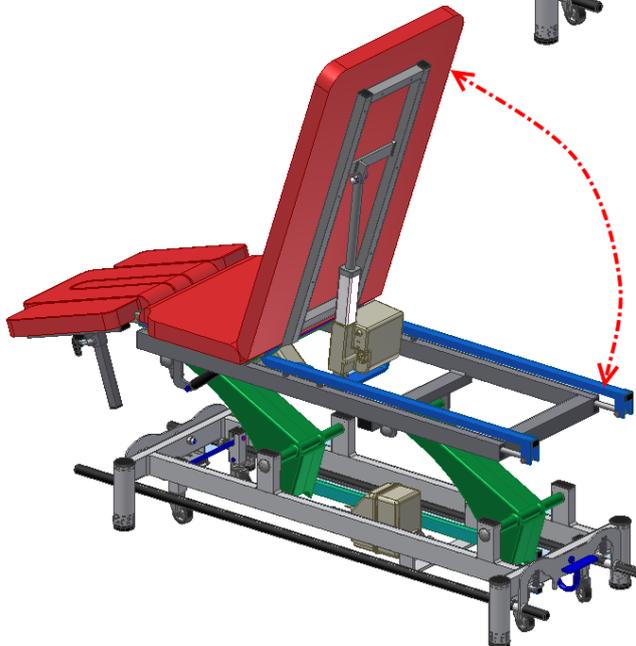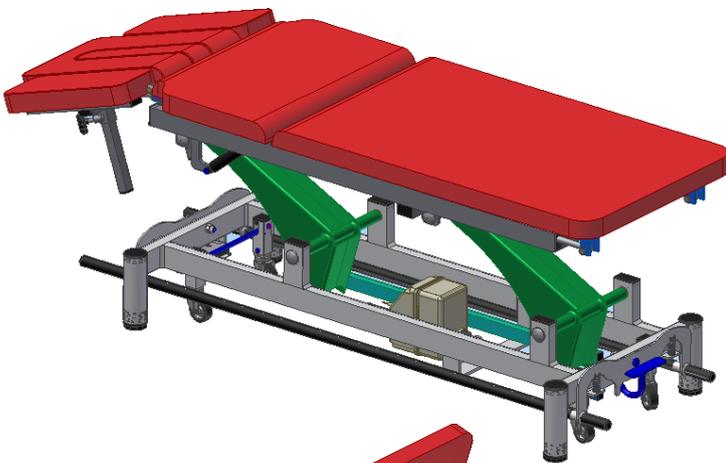

4° / REGLAGE DE LA POSITION CYPHOSE :

Avant tout réglage de la table en position cyphose, merci de vérifier les points suivants :

- Assurez-vous que votre patient est bien installé et que toutes les précautions ont été prises pour la sécurité du patient et de vous-même.
- Le patient doit être couché sur le ventre avec la taille au niveau de l'articulation des deux dossiers.
- Veillez à ce qu'aucun vêtement, membres du patient (bras, jambes, mains, doigts) ne soit dans la zone de mouvement de la table.
- Ecartez-vous de la table et des zones de mouvement pour utiliser la table et procéder au réglage.


Le réglage s'effectue avec la télécommande :

- 1/ Saisir la commande en main
- 2/ appuyer sur le bouton de réglage de la cyphose
- 3/ lorsque le cadre est en position cyphose souhaitée, relâcher le bouton
- 4/ le patient peut se coucher et s'appuyer sur la table
- 5/ raccrocher la commande sur son support


Commande de la position Cyphose



Veillez à ce que le patient soit bien installé et positionné et qu'il ne bouge pas lors du réglage de la Cyphose.

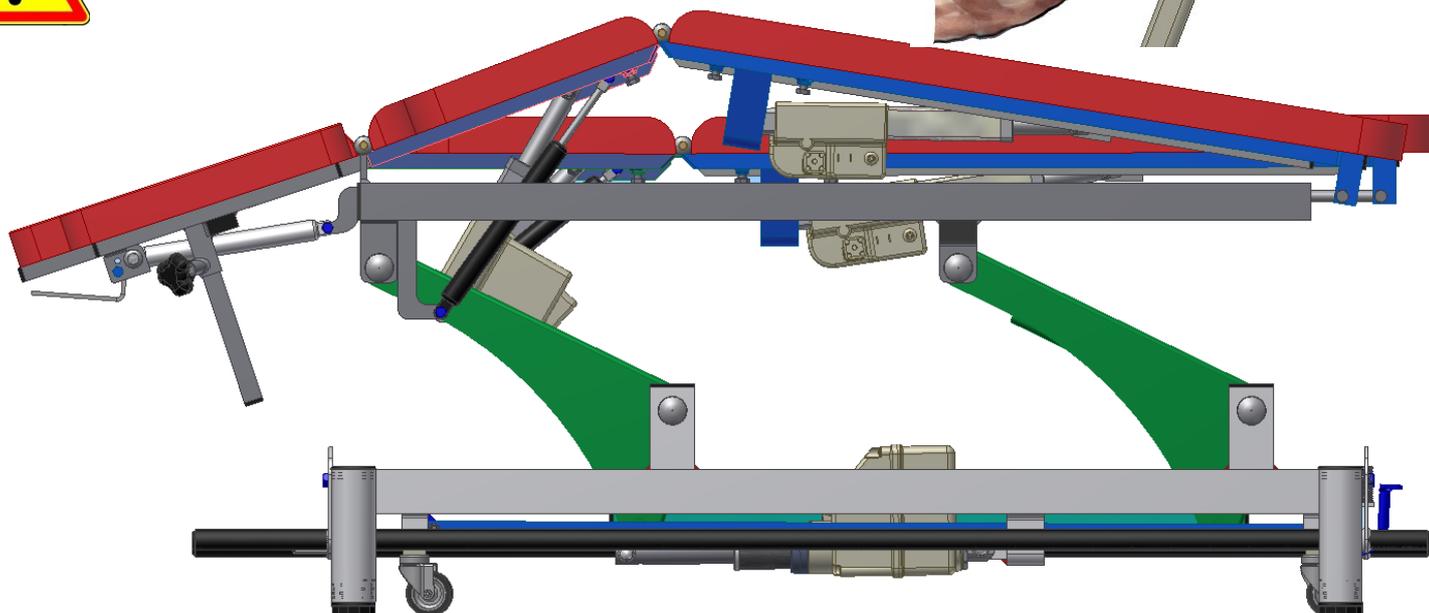

NOTA : vérifier toujours lors de l'inclinaison des dossiers qu'aucun obstacle, qu'aucun membre du patient, ou vous-même, soit dans la **zone dangereuse**.

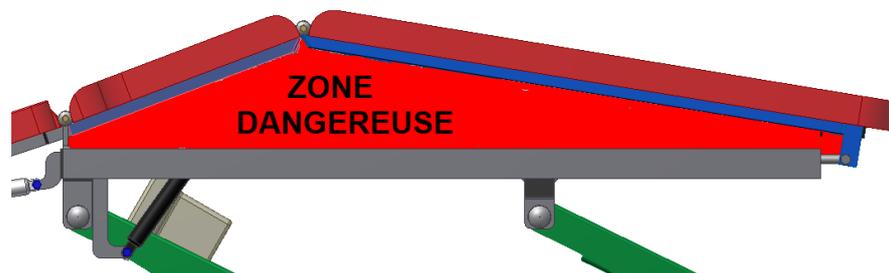

5° / REGLAGE DE LA TÊTIÈRE :



Le réglage de la Tête peut s'effectuer avec un patient installé sur la table.

- Lors du réglage de la Tête, il est important de vérifier qu'aucun objet, mobilier, vêtement, membres (mains, bras, doigts du patient) ne viennent gêner le réglage de la tête.
- En cas d'utilisation d'un tabouret en position assise, merci de bien vouloir vous mettre en retrait par rapport à la tête pour éviter tout risque d'écrasement des genoux par la table en cas de descente prématurée.
- Toujours vérifier le bon fonctionnement du déblocage de la tête, pour cela effectuer quelques blocage/déblocage à vide en utilisant la manette de déblocage.
- Toujours accompagner la tête en position de manière à éviter tout risque d'effet "catapulte", et ne pas forcer sur la tête quand celle-ci est réglée en position limite (-30° / +40°)
- Vérifier la présence du bouchon du trou de visage : en cas d'utilisation avec le visage du patient dans le trou visage, stocker le bouchon dans une zone sans risque de choc ou de détérioration pour le bouchon.
- Toujours vérifier le bon serrage des boutons de serrage des accoudoirs pour éviter tout risque de glissement des accoudoirs en cas d'appui du patient sur les accoudoirs.
- Il est nécessaire lors du réglage de la tête que le patient n'appuie pas sa tête sur la tête pour vous faciliter le réglage.
- Le patient peut utiliser les accoudoirs pour appuyer ses bras, à l'utilisateur de vérifier le bon réglage de la hauteur des accoudoirs pour le confort du patient.


Le réglage de la tête s'effectue grâce à l'assistance d'un vérin à gaz déblocable :

1/ maintenir d'une main la tête et de l'autre actionner la manette de déblocage située à la tête de la tête.

2/ régler l'inclinaison souhaitée

3/ relâcher la manette de déblocage.

4/ la tête est alors bloquée dans l'inclinaison souhaitée, le patient peut poser sa tête sur la tête.

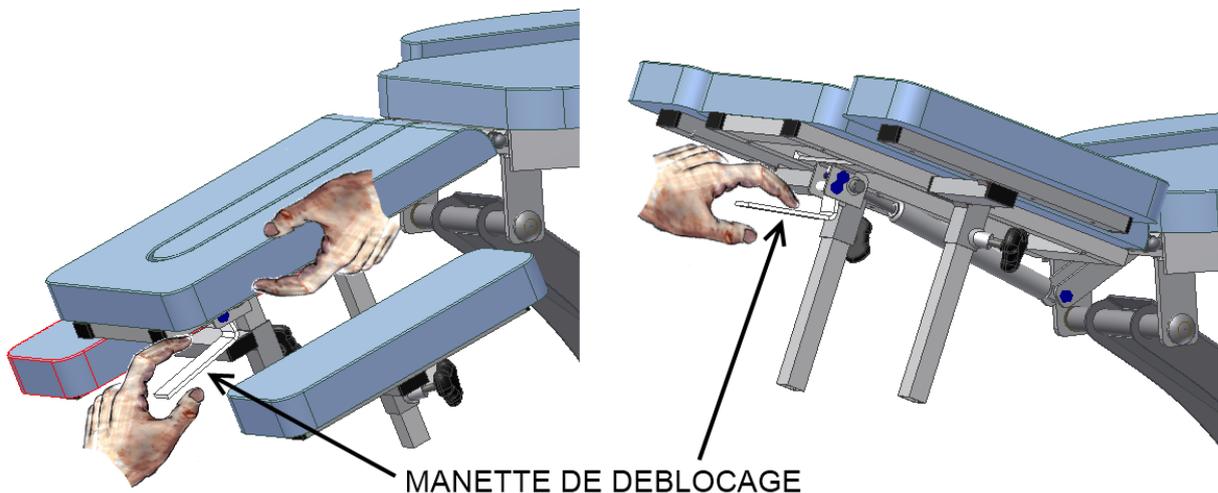

Pour les versions spéciale dotée d'une Tête électrique :

Bien respecter les mêmes règles de sécurité que pour une tête standard.

1/ Saisir la commande manuelle aimantée (ou commande aux pieds selon le choix du client)

2/ appuyer sur le bouton de la commande et régler l'inclinaison souhaitée

3/ relâcher la commande : la tête est bloquée, le patient peut de nouveau poser sa tête ou son visage.

6° / REGLAGE DES ACCOUDOIRS :




- Ne pas s'asseoir, s'appuyer ou se poser sur les accoudoirs.
- Les accoudoirs n'ont pour seule utilité l'appui des mains ou avant-bras.
- Ils ne doivent faire l'objet d'une toute autre utilisation.
- Ne rien poser d'objet, d'appareil ou de vêtement sur un accoudoir.
- Toujours vérifier l'état du serrage des accoudoirs avant toute utilisation avec le patient.
- En cas de retrait des accoudoirs de leurs supports, les stocker dans une zone sans risque de détérioration et de chocs.
- Ne pas passer les doigts ou la main entre l'accoudoir et la tête (risque d'écrasement)
- En cas d'utilisation d'une housse éponge pour recouvrir la table, faire attention à ce que la
- Housse ne gêne pas ou ne s'accroche.
- En cas de blocage du bouton de serrage pour serrer/desserrer, ou que le bouton est bloqué, ne pas forcer dessus (risque de détérioration du pas de vis) → veillez à graisser régulièrement le pas de vis du bouton de serrage (voir consignes d'entretien et de graissage)

La Tête est équipée de 2 accoudoirs latéraux réglables en hauteur avec blocage par bouton de serrage. Ces accoudoirs couissent sur les tubes chromés (veillez à leur état de surface)

Le réglage des accoudoirs s'effectue grâce aux boutons situés sous les accoudoirs au niveau du guide accoudoirs.

En dévissant chaque bouton de serrage, vous pouvez régler la hauteur désirée.
Toujours visser le bouton de serrage M10 en fin de réglage.


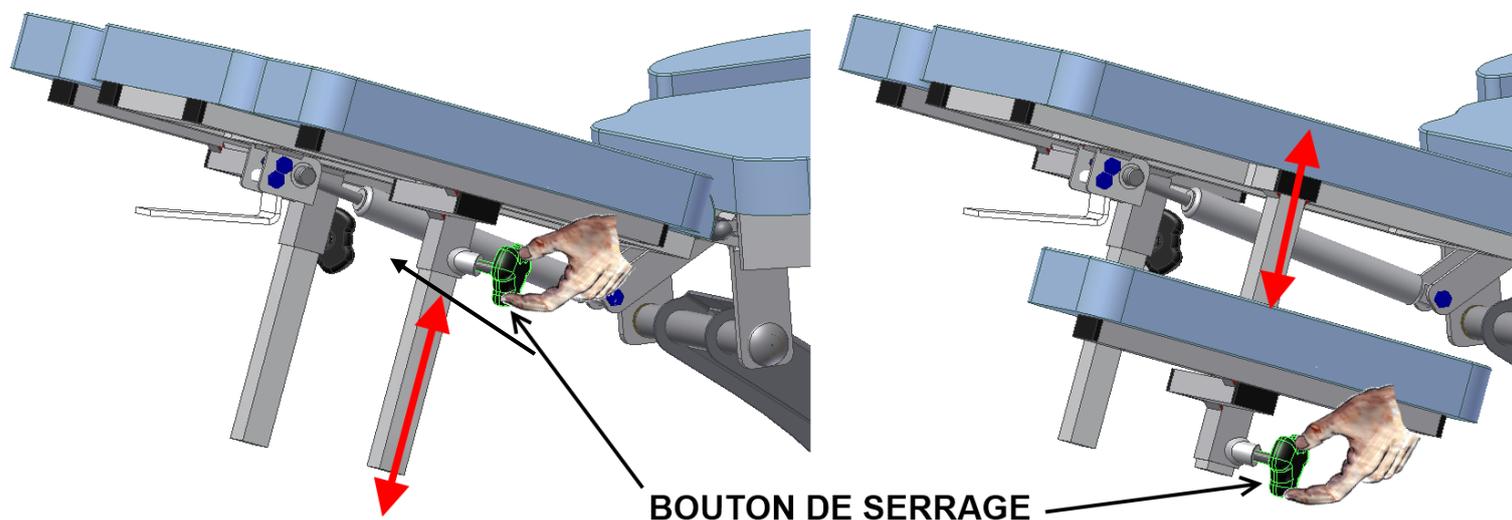


Les accoudoirs peuvent être retirés de la Tête : dans ce cas les stocker dans une zone sans risque de détérioration ou de choc.

Vérifier régulièrement le bon serrage des boutons et l'état du graissage des pas de vis de chaque bouton.

Lors de leur remise en place, veillez au bon sens d'insertion de chaque accoudoir.

TRANSPORT

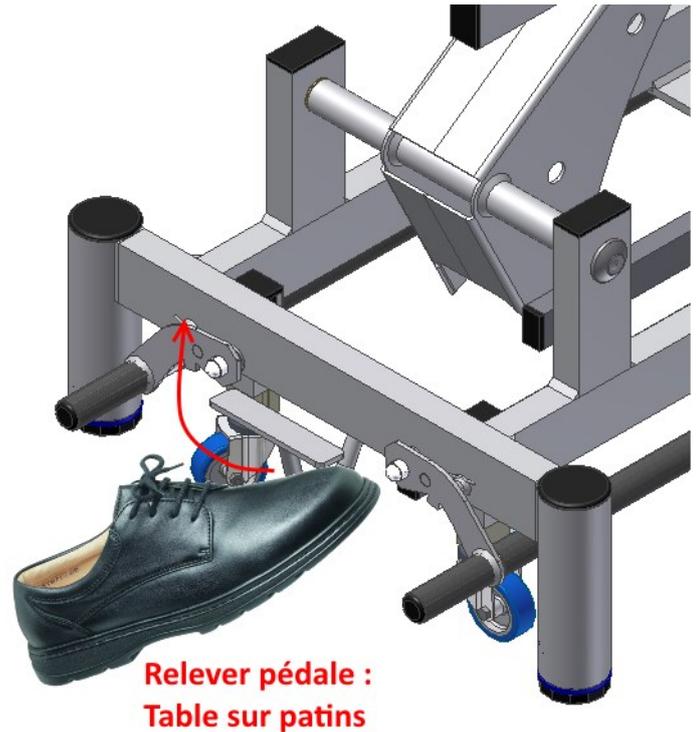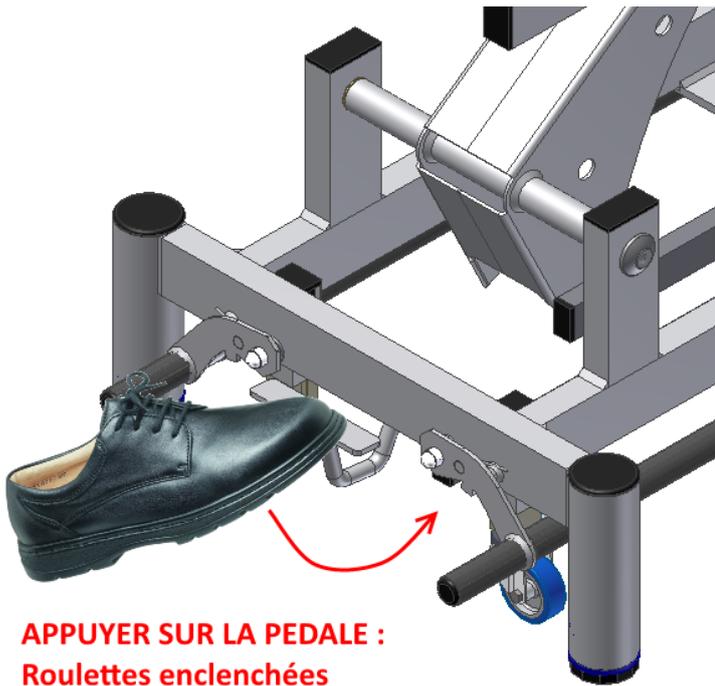


Le transport de la table est facilité par l'utilisation de roulettes escamotables à déclenchement situées de chaque côté du pied de la table.

Pour déplacer la table, il suffit d'appuyer avec le pied sur la pédale de déclenchement afin d'actionner la descente et l'enclenchement des roulettes.

Bien vérifier qu'aucun câble, tuyau ne se prenne dans les roulettes.

Pour remettre la table en position statique, relever la pédale afin que les roulettes se dés-enclenchent et remontent.

Si les roulettes ne touchent pas le sol lors du déblocage de la pédale, vérifier les patins, et au besoin resserrer les patins en plastiques et vérifier la stabilité de la table.

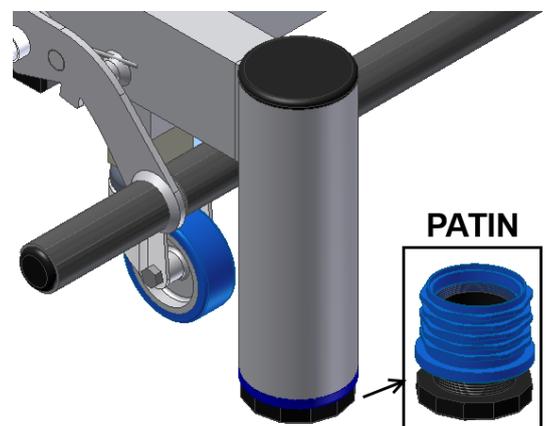

ENTRETIEN - NETTOYAGE

Avant chaque nettoyage de la table, s'assurer que la table est débranchée.



Le revêtement de la table peut être nettoyé uniquement avec de l'eau savonneuse. A proscrire l'emploi de produit détergent ou alcoolisé.

Pour un entretien régulier de votre table, nous recommandons l'emploi d'un chiffon sec pour nettoyer le châssis.

Vérifier régulièrement l'état de propreté du piston de chaque vérin électrique équipant votre table.

Lorsque la table n'est pas utilisée pendant une longue période, débrancher la prise d'alimentation et protéger la table par une couverture, une bâche de protection contre la poussière.

Si la table possède des boutons de serrage, les desserrer et les graisser tous les 2 mois.

Chaque semaine : nettoyage de la tige chromée du vérin électrique de montée/descente de la table avec un produit de nettoyage type bombe pour nettoyer les meubles "Plizz" ou "Pledge"

L'accumulation de poussière est souvent à l'origine de pannes ou de désagréments sonores : pensez à nettoyer régulièrement votre table.

PROBLEMES TECHNIQUES :

En cas de problème technique, nous vous prions de bien vouloir nous contacter au **03-86-68-83-22** afin de diagnostiquer votre panne et vous aider à résoudre le problème rencontré.



Toute manœuvre de diagnostic devra s'effectuer sans patient ou charge sur la table.

Toute intervention par vous-même sur les vérins électriques, télécommande ou boîtier électrique se fera avec précaution en tenant compte des recommandations.

Panne Electrique :

Si lors d'une commande de manœuvre de la table, soit par le cadre de commande ou bien par la télécommande, vous constatez qu'aucun vérin ne répond, veillez à vérifier s'il ne s'agit pas d'une panne de courant du réseau EDF, ou d'un problème sur votre prise de courant.

→ **Tester avec un autre appareil si la tension est présente sur la prise de courant.**

→ **Débrancher et rebrancher la prise électrique des vérins**

VERIN DE MONTEE/DESCENTE :

- vérifier du côté des contacteurs du cadre de commande si lors d'appuis légers sur le cadre de commande le vérin de montée/descente fonctionne : si le vérin ne répond pas il peut s'agir d'une détérioration d'un contacteur.
- dans un autre cas il peut s'agir d'une panne du vérin lui-même.
-

Si après vérification de votre part, vous constatez aucune amélioration, une intervention d'un de nos techniciens pour échange de pièces sera convenue.

Problème de déblocage du vérin à gaz placé sous la tête :

- La tête se relève d'elle-même ou bien ne se relève plus : un problème de réglage du déblocage est possible

→ Veuillez nous contacter pour vous fournir les indications de réglage du déblocage du vérin.

GARANTIES – ENGAGEMENTS

Les éléments et descriptions techniques présents dans ce manuel sont à titre contractuel. La société FRANCO & Fils se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques de ses appareils médicaux à fin d'améliorations techniques, et cela sans préavis.

Les indications figurant dans ce livret sont des données relatives aux dispositifs fabriqués et commercialisés de série, et certaines modifications pourraient être constatées d'une version à fin d'améliorations techniques.

Toute intervention ou modification technique sur ce matériel est interdite sans l'accord écrit du fabricant et dégage totalement sa responsabilité, de même pour toute pièce d'origine étrangère à notre fabrication.

Nous dégageons toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir si les consignes d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées. La société FRANCO & Fils ne sera pas tenue pour responsable des dommages causés par le non-respect des règles de sécurité.

Toute intervention ou modification technique sur ce matériel est interdite sans l'accord écrit du fabricant et dégage totalement sa responsabilité, de même pour toute pièce d'origine étrangère à notre fabrication.


GARANTIE 3 ANS :

Châssis, vérins électriques (sauf sellerie et pièces mécaniques)


Garantie 1 an sur :

Vérins à gaz et pièces (câbles, fixation)

Commandes des vérins électriques (pédale, commande aimantée)

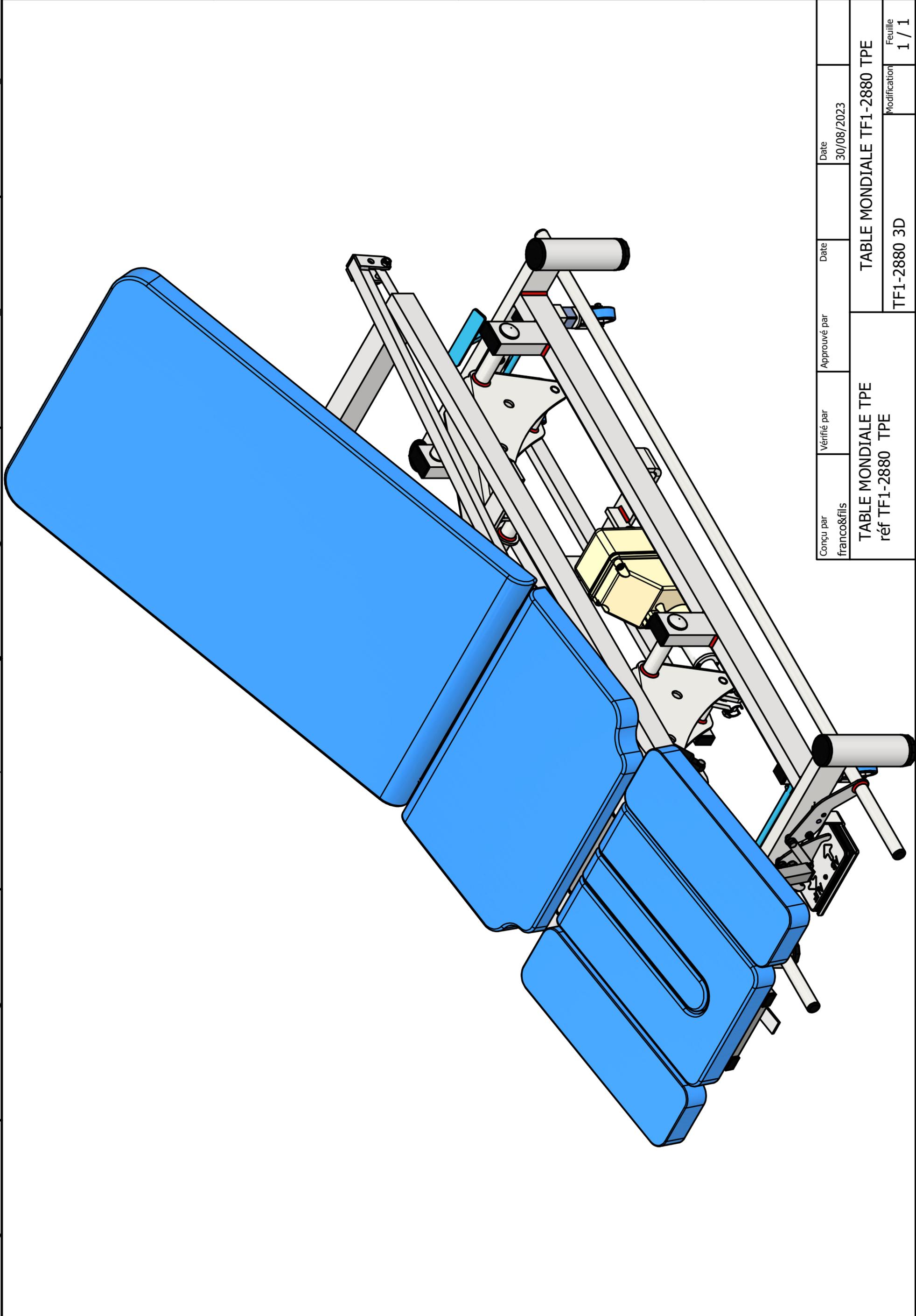

Conçu par franco&fils	Vérifié par	Approuvé par	Date 30/08/2023	Date
TABLE MONDIALE TPE réf TF1-2880 TPE		TABLE MONDIALE TF1-2880 TPE		
		Modification TF1-2880 3D		Feuille 1 / 1

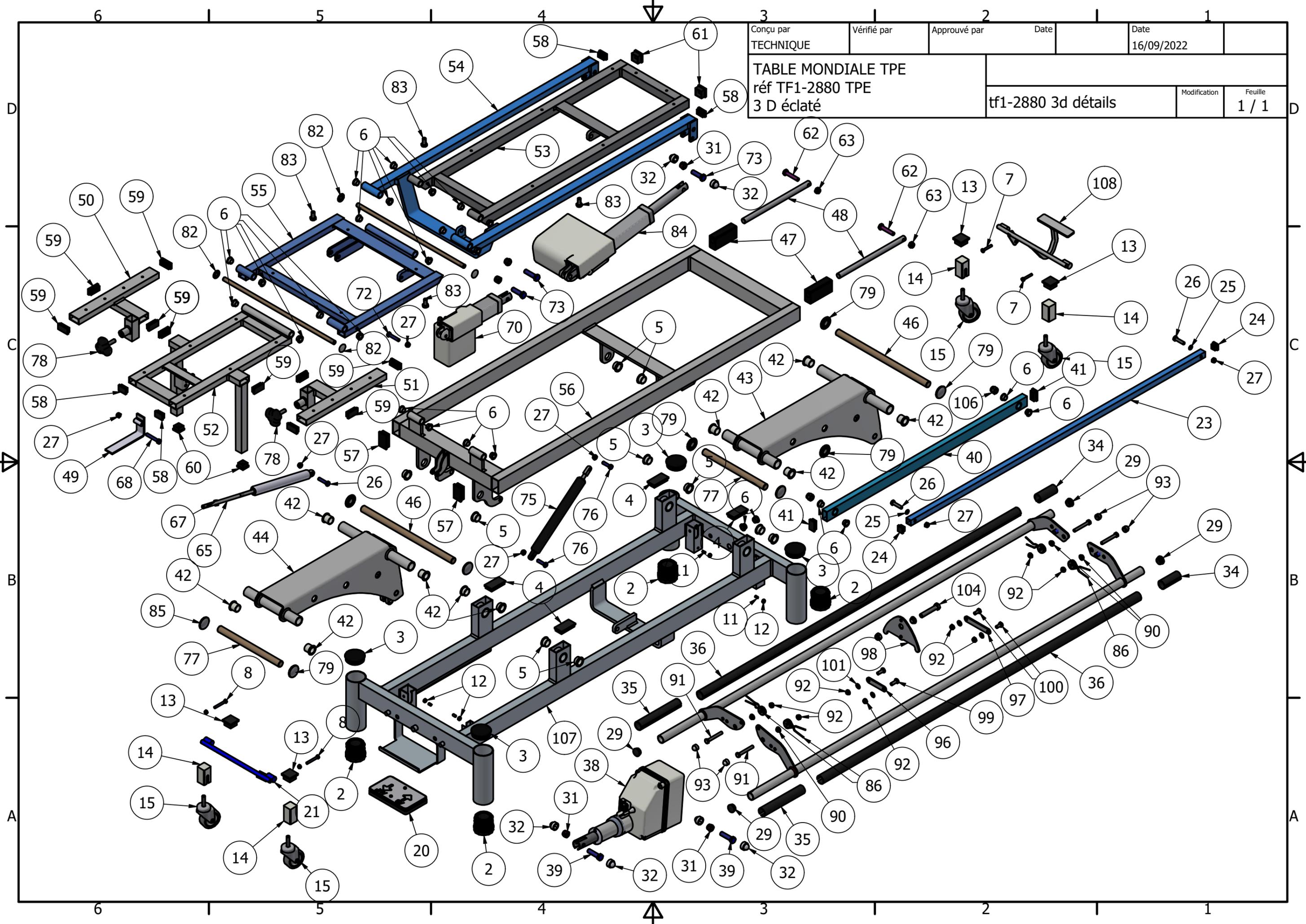

Conçu par TECHNIQUE	Vérfié par	Approuvé par	Date	Date 16/09/2022
TABLE MONDIALE TPE réf TF1-2880 TPE 3 D éclaté			tf1-2880 3d détails	Modification
				Feuille 1 / 1

D

D

C

C

B

B

A

A

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

TABLE MONDIALE T.P.E. Réf TF1-2880				30/05/2023
Numéro	qté	Référence	Désignation	
1	1	tf1-2880-001 F (cdc2)	PIETEMENT	
2	4	patin M42 (vis+écrou)	PATIN DE PIED M42 ø60	VPC60 NOIR
3	4	embout ø60	EMBOUT DE PIED SUPERIEUR ø60	SLC ø60 NOIR
4	4	embout 60x30	EMBOUT RECTANGULAIRE 60*30	ERS 60*30 NOIR
5	12	bague skiffy ø20-ø24-10	BAGUE SKIFFY ø20-ø24-15	008-2000-000-02
6	26	skiffyø12	BAGUE SKIFFY ø12-ø16-10	008-1207-000-02
7	2	ISO 4017 - M6 x 35	Vis à tête hexagonale TH M6*35	
8	2	ISO 4017 - M6 x 45	Vis à tête hexagonale TH M6*45	
9	4	DIN 988 - S6 x 12	RONDELLE PLATE ø6	
10	2	DIN 1587 - M6	Ecrou borgne hexagonal à calotte H,M6	
11	4	DIN 913 - M6 x 10	Vis sans tête à six pans creux ST Hc M6x10	
12	4	ISO 4032 - M6	Ecrous hexagonaux H,M6	
13	4	embout 35x35	Embout carré 35x35 noir	ECS35x35 Noir
14	4	tf1-2800-019	Guide Roulettes PVC	
15	4	roulette ø60	Roulettes standard ø60	PIVO1670PJO060-570-12*25
20	1	commande pieds	Commande aux pieds Hanning	966401041
21	1	tf1-2880-013 B	DEBLOCAGE AVANT	
22	1	tf1-2880-014 b	DEBLOCAGE ARRIERE	
23	1	tf1-700-011c	BARRE DE DEBLOCAGE	
24	2	embout 20x20	EMBOUT CARRE 20*20 NOIR	ECS 20x20 NOIR
25	2	DIN 988 - S8 x 14	RONDELLE ø8	
26	3	ISO 4017 - M8 x 35	Vis à tête hexagonale TH M8*35	
27	7	ISO 7042 - M8	Ecrous hexagonaux autofreinés H,M8	
29	4	EMBOUR ROND ø25	EMBOUR ROND ø25	
31	5	ISO 7042 - M12	Ecrous hexagonaux autofreinés H,M12	
32	6	cache écrou M12	CACHE ECROU H,M12 CBUM12 SW13	
34	2	cdc-tf1-700-005	TUBE PVC OUVERT ø28*ø25-LONG 70	
35	2	cdc-tf1-700-006	TUBE PVC OUVERT ø28*ø25-LONG 1350	
36	2	cdc-tf1-700-007	TUBE PVC OUVERT ø28*ø25-LONG 170	
38	1	vérin sl95-200 (corps)	VERIN HANNING SL95 - COURSE 200 MM - F:7000 N - V: 14 MM/S	
39	3	ISO 4017 - M12 x 45	Vis à tête hexagonale THM12*45	
40	1	tf1-2880-002	BARRE DE LIAISON ARCEAUX	
41	2	embout 35x20	EMBOUT RECTANGULAIRE 35*20	ERS35*20 NOIR
42	8	bague skiffy ø20-ø24-22	BAGUE SKIFFY ø20-ø24-15	008-2000-000-02
43	1	TF1-700-003 C (spec TF1-2880)	ARCEAU AVANT	
44	1	TF1-700-004 C	ARCEAU ARRIERE	
46	2	tf1-2880-025	AXE ARTICULATION PFø20-385	(piètement / arceau)
47	2	tf1-2880-024	GLISSIERE PVC 27,7*43,7*90	
48	2	tf1-2880-020	AXE DE TRANSLATION Piø16-250	
49	1	tf1-2880-012	MANETTE DE DEBLOCAGE	
50	1	tf1-2880-011 gauche (JUIL 2019°	ACCOUDOIR DROITE	
51	1	tf1-2880-011 droite (JUIL 2019)	ACCOUDOIR GAUCHE	
52	1	tf1-2880-010 B	TETIERE	
53	1	tf1-2880-008	DOSSIER RELEVABLE	
54	1	tf1-2880-007	CADRE DORSAL	
55	1	tf1-2880-006	CADRE VENTRAL	
56	1	TF1-2880-005 E	CHASSIS SUPERIEUR	
57	2	embout 50x30	EMBOUT RECTANGULAIRE 50*30 NOIR	ERS50*30 NOIR
58	4	embout 30x20	EMBOUT RECYANGULAIRE 30*20 NOIR	ERS30*20 NOIR
59	10	embout 40x20	EMBOUT RECTANGULAIRE 40*20 NOIR	ERS40*20 NOIR
60	2	embout 25x25	EMBOUT CARRE 25*25 NOIR	ECS25*25 NOIR
61	2	embout 30x30	EMBOUT CARRE 30*30 NOIR	ECS30*30 NOIRµ
62	2	ISO 4017 - M10 x 50	Vis à tête hexagonale TH M10*50	
63	2	ISO 7042 - M10	Ecrous hexagonaux autofreinés H,M10	
66	1	vérin gaz corps KOB1P-3-100-354--0	vérin gaz KOB1P-3-100-354--002-350N	KOB1P-3-100-354--002-350N
67	1	ISO 4036 - M10	écrou hexagonal H,M10	
68	1	ISO 4017 - M8 x 50	Vis à tête hexagonale TH,M8*50	

70	1	vérin SL56	vérin hanning SL56 course 100 F:4000 N	963.000.522 F
72	1	ISO 4017 - M8 x 40	Vis à tête hexagonale TH M8*40	
73	2	ISO 4017 - M12 x 40	Vis à tête hexagonale TH M12*40	
75	1	vérin	vérin gaz KOA1-K73-120-382-002-250 N	KOA1-K73-120-382-002-250 N
76	2	ISO 4017 - M8 x 30	Vis à tête hexagonale	
77	2	pfø20-260	Axe articulation PFø20-260	(arceau / chassis supérieur)
78	2	BOUTON TRIO M10	Bouton Trio M10x30	Trio M10x30
79	8	avdel ø20	Enjoliveur chromé pour axe ø12 S6	6675-2120-BVNX D,12
80	1	pfø12-470	Axe articulation PFø12-470	(Cadre ventral/Tête)ière)
81	1	pfø12-454	Axe articulation PFø12-454	(Cadre ventral / dossier relevable)
82	4	avdel ø12	Enjoliveur chromé pour axe ø12 S6	6675-2120-BVNX D,,12
83	4	ISO 4017 - M10 x 20	Vis à tête hexagonale TH M10x20	
84	1	vérin sl80	Vérin Hanning SL80 course: 200 mm Force: F 6000 N - vitesse : 7 mm/s	
85	1	avdel ø20_CPY	Enjoliveur chromé pour axe ø20 S6	6678-2200-BVNX D.20
86	4	ressort tf1-400	Ressort de compression TF1-400	RTS TS 0250-0250-00012A
87	1	DIN 916 - M6 x 12	Vis sans tête à six pans creux ST Hc M6x12	
90	4	skiffyø8	Bague Skiffy ø8-ø12-10	
91	4	ISO 4017 - M8 x 60	Vis à tête hexagonale TH M8*60	
92	4	ANSI B18.16.3M - Property Class 5 a	Ecrou hexagonal autofreiné H,M8	
93	4	cache écrou M8	Cache écrou H,M8	CBUM8 blanc
94	1	cdc2-tf1-700-001 gauche	Bras de Cadre de commande Gauche	
95	1	cdc2-tf1-700-001 droite	Bras de Cadre de commande Droite	
96	1	cdc2-tf1-700-001	Renvoi droite	
97	1	cdc2-tf1-700-002	Renvoi gauche	
98	1	cdc2-tf1-700-003	Balancier	
99	2	ISO 4017 - M8 x 20	Vis à tête hexagonale TH M8*20	
100	2	ISO 4017 - M8 x 16	Vis à tête hexagonale TH M8*16	
101	4	ISO 7091 - ST 8 - 100 HV	Rondelles plates M8	
102	4	ANSI B18.16.3M - Classes de qualité	Ecrou hexagonal autofreiné H,M8	
103	1	ANSI B18.16.3M - Property Class 5 a	Ecrou hexagonal autofreiné H,M12	
104	1	ISO 4017 - M12 x 65	Vis à tête hexagonale TH M12x65	
105	1	skiffyø12 coupé à ep 6+2	BAGUE SKIFFY ø12-ø16-10	008-1207-000-02
106	2	ISO 7041 - M12	Ecrous hexagonaux autofreinés H,M12	