



Franco&Fils

FABRICANT D'APPAREILS PARA-MÉDICAUX
R.C. Nevers B 691880454 - SAS Capital 43 200 €



760 Avenue de Paris
Zone Industrielle - RN7
58320 POUQUES LES EAUX
Tél: 03.86.68.83.22 - info@francofils.com
site : www.francofils.com
N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 66691880454 - NAF 3250 A

MONTAGE DES FER PLATS DE MAINTIEN DU BOUCHON DE VISAGE SUR UN DOSSIER DE TABLE

Composition du kit :

Fer plats acier+ vis de fixation + rondelles cuvettes (plastiques ou acier)
(selon la version de dossier vous pouvez soit mettre les 2 fer plats ou 1 fer plat acier + 2 pattes acier)

Outillage nécessaire :

- Un tournevis cruciforme
OU
- Perceuse deviseuse + embout cruciforme

1/ monter le bouchon dans le trou visage et mettre a plat au même niveau des 2 faces noires

2/ Positionner chaque fer plat en se servant du milieu axe du trou du bouchon

Mettre dans chaque trou une vis + rondelle cuvette

Visser avec le tournevis ou la perceuse - dévisseuse chaque vis pour maintenir le fer plat

