

PERTE DES PASTILLES NYLON



En cas de retrait total d'un plongeur Avant ou Arrière d'une des poutres de pied, il se peut que vous "perdiez" la pastille de nylon servant au serrage de ce plongeur.

En général ces pastilles tombent au fond de la poutre de pied.

S'assurer que les barres parallèles ne sont pas utilisées.

Oter le plongeur de la poutre de pied .

Récupération de la pastille Nylon :

1/ ôter les plongeurs pour libérer l'accès a la poutre


2/ incliner légèrement chaque platine au sol pour tenter de récupérer la pastille

Repositionner la pastille Nylon :

avec un petit crochet (fil de fer courbé croché) *ou avec votre doigt*, présenter la pastille Nylon dans l'axe du serrage.

- pousser la pastille de manière à la remettre dans son emplacement initial.

Replacer le plongeur et procéder au serrage.

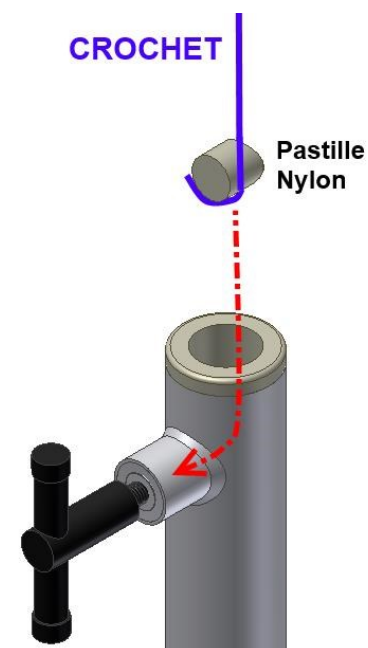

ENTRETIEN :

A proscrire toute utilisation de produit détergent ou alcoolisé.

Pour un entretien régulier de cet appareil nous vous recommandons l'emploi d'un chiffon sec pour nettoyer les différents équipements.

Tous les 2 mois, dévisser les manettes de serrage et graisser les filetages.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

**A la fin du montage total de la barre parallèle :
vérifier la bonne assise de chaque platine au sol,
le bon serrage des boutons de serrage.**

Au besoin : fixer la barre au sol pour un meilleur maintien de la barre.



Une mauvaise vérification du vissage / serrage des boutons peut entraîner un endommagement prématuré de la barre ou provoquer un accident. (*mauvais serrage = risque de chute*)

- Toujours s'assurer qu'il n'y a aucune personne près des barres parallèles l'appareil lors de leur utilisation des barres.
- L'appareil n'est **pas prévu pour des charges supérieures à 130 kg.**
- Toujours s'assurer que toutes les manettes de serrage sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Ne pas intervenir sur le réglage de l'appareil lorsqu'un patient est présent sur l'appareil.
- Prendre toutes les précautions lors du réglage des barres.
- Graisser tous les 2 mois les filetages des manettes de serrage.
- Ne jamais enlever les barres de leurs supports : des pastilles de serrage en nylon risqueraient de tomber au fond des poutres de pied.
- Les repères situés sur les barres de réglages sont simplement des points de repère pour le réglage d'une séance à l'autre, et non une base de mesure.

GARANTIES – ENGAGEMENTS

Les éléments et descriptions techniques présents dans ce manuel sont à titre contractuel.

La société FRANCO & Fils se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques de ses appareils médicaux à fin d'améliorations techniques, et cela sans préavis.

Les indications figurant dans ce livret sont des données relatives aux dispositifs fabriqués et commercialisés de série, et certaines modifications pourraient être constatées d'une version à fin d'améliorations techniques.

Toute intervention ou modification technique sur ce matériel est interdite sans l'accord écrit du fabricant et dégage totalement sa responsabilité, de même pour toute pièce d'origine étrangère à notre fabrication.

Nous dégageons toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir si les consignes d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées.

La société FRANCO & Fils ne sera pas tenue pour responsable des dommages causés par le non-respect des règles de sécurité.

Toute intervention ou modification technique sur ce matériel est interdite sans l'accord écrit du fabricant et dégage totalement sa responsabilité, de même pour toute pièce d'origine étrangère à notre fabrication.

GARANTIE 3 ANS